



Oxivir Excel™ Foam

Széles hatásspektrummal rendelkező tisztító- és fertőtlenítőhab vízálló kemény felületekre

Termékleírás

Az Oxivir Excel Foam egy széles hatásspektrummal és rövid behatási idővel rendelkező használatra kész hab, mely egy lépésben tisztít- és fertőtleníti. A Diversey Care által szabadalmaztatott AHP (gyorsított hidrogén-peroxid) tartalmú összetételének köszönhetően az Oxivir Excel Foam minden kemény, vízálló felületen és egyes kárpitokon is alkalmazható.

Legfontosabb tulajdonságok

- Baktericid, fungicid és virucid hatásspektrummal rendelkezik
- Fertőtlenítő hatását már 1 perc alatt kifejti
- Előírászerű használat esetén nem jelent veszélyt a felhasználóra és kíméletes a felületekhez
- Hatékonyan tisztít
- Illatanyag-mentes
- Aktív hatóanyaga vízre és oxigénre bomlik le
- Nem szükséges leöblíteni

Előnyök

- Mikrobiológiai tesztek (EN tesztek) tanúsága szerint a kórokozók széles köre ellen hatékony, teljes virucid hatással rendelkezik, többek között a *Poliovirus*, *Adenovirus* és *Murine norovirus*-t is elpusztítja, hatékony minden burokkal rendelkező vírus ellen (HIV, HBV, HCV, *Influenza*, *Vaccinia virus* és *Coronavirus*). Széles hatásspektrumának köszönhetően magas higiéniai színvonal biztosítására alkalmas
- Rövid behatási idejének köszönhetően gyorsan és hatékonyan fertőtleníti
- Kitűnően tisztít, valamint vízkőoldó hatással is rendelkezik, így nincs szükség a fertőtlenítés előtt elő-tisztításra
- A felhasználókra és a felületekre nézve egyaránt biztonságos, a használatra kész oldat nem rendelkezik veszélyre utaló figyelmeztetéssel, nem tartalmaz a légzőszerveket irritáló összetevőket
- AHP tartalma kíméletes a felületekkel, így növelheti a berendezések élettartamát
- Az egészségügyben magas kockázati besorolással rendelkező helyiségekben és felületeken, többek között intenzív osztályok, inkubátorok, betegszobák fertőtlenítésére is alkalmas

Összetevők

biocid hatóanyag: Hidrogén-peroxid (CAS:7722-84-1) 3,6 g/kg

Használati útmutató

Adagolás

A készítményt töményen, hígítás nélkül kell alkalmazni. Töröljük át a fertőtleníttendő felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig.

Kombinált (tisztító- fertőtlenítő hatású) terméként történő felhasználás:

baktericid és virucid hatáshoz, behatási idő: 30mp, yeasticid hatáshoz: 5 perc

Előzetesen megtisztított felületen:


fungicid hatás: 60 perc

Alkalmazás

Habtisztítás és fertőtlenítés:

1. Távolítsa el a makacs szennyeződések.
2. Vigye fel a szert egy tiszta, száraz törülközőre vagy közvetlenül a felületre a szórófej segítségével.
3. A szükséges behatási idő** letelte után törölje a felületet szárazra, vagy hagyja megszáradni.

Fontos: Ne keverje más tisztítószerrel! Ne használja víz- vagy sav-érzékeny felületeken!

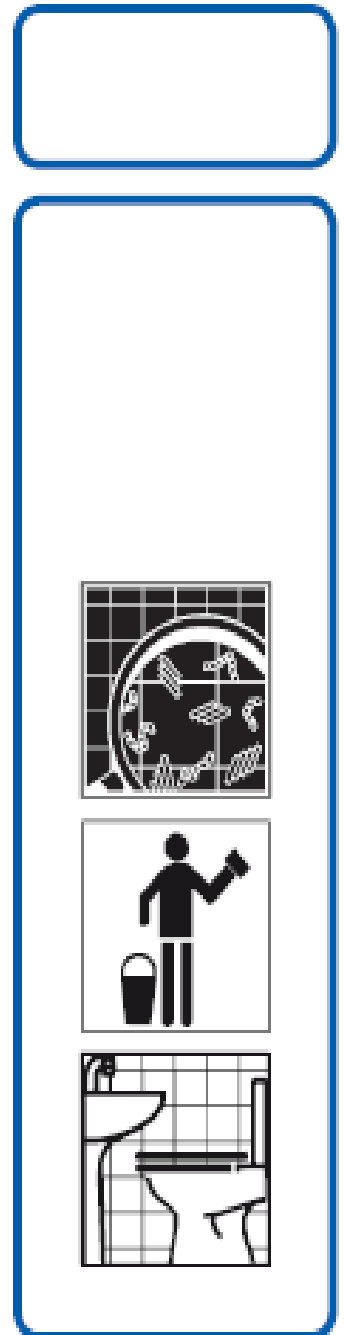

A felületnek a behatási idő alatt végig nedvesnek kell maradnia!

Technikai adatok

Megjelenés:	Tiszta, színtelen folyadék
Relatív sűrűség [20° C]:	1,00 g/cm ³
pH:	1.95
Minőségmegőrzési idő:	2 év
Illat:	semleges

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. Oxidálható anyagokkal reagál.

Termékkompatibilitás: A termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Oxivir Excel minden általánosan használt eszköz és felület fertőtlenítésére alkalmas.

Környezeti információ: A termékben található felületaktív összetevők a 648/2004. EK rendeletben foglaltaknak megfelelően biológiailag lebomlók.

Mikrobiológiai adatok: A termék mikrobiológiai hatékonyságát a következő mikrobiológiai tesztek igazolják: EN13727, EN13624, EN14476, EN13704.

Szennyezés-mentesítés: A folyadékot megkötő anyaggal itassuk fel.

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, élelmiszerektől elkülönítve gyártástól számított 24 hónapig eltartható.

Terméktípus: PT2.

Gyártja: Multifill BV, Constructieweg 25a. Mijidrecht, P.O. Box 367, 3640 AJ

Forgalmazza: Diversey Kft. 2040 Budaörs, Puskás T u. 6.

OTH engedélyének száma: JKF/1026-4/2017.

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.