



Oxivir Excel™ conc.

Széles hatásspektrummal rendelkező tisztító- és fertőtlenítőszer koncentrátum vízálló kemény felületekre

Termékleírás

Az Oxivir Excel conc. egy széles hatásspektrummal és rövid behatási idővel rendelkező, egy lépésben tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum. A Diversey Care által szabadalmaztatott AHP (gyorsított hidrogén-peroxid) tartalmú összetételének köszönhetően az Oxivir Excel conc. minden kemény, vízálló felületen és esetenként textíliákon is alkalmazható.

Legfontosabb tulajdonságok

- Baktericid, virucid, yeasticid, fungicid* és sporocid* hatásspektrummal rendelkezik
- Fertőtlenítő hatását már 1 perc alatt kifejti
- Előírászerű használat esetén nem jelent veszélyt a felhasználóra és kíméletes a felületekhez
- Hatékonyan tisztít
- Illatanyag-mentes
- Aktív hatóanyaga vízre és oxigénre bomlik le
- Nem szükséges leöblíteni

Előnyök

- Mikrobiológiai tesztek (EN tesztek) tanúsága szerint a kórokozók széles köre ellen hatékony, teljes virucid hatással rendelkezik, többek között a Poliovírus, Adenovírus és Murine norovírust is elpusztítja, hatékony minden burokkal rendelkező vírus ellen (HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia vírus és Coronavirus). Széles hatásspektrumának köszönhetően magas higiéniai színvonal biztosítására alkalmas
- Rövid behatási idejének köszönhetően gyorsan és hatékonyan fertőtleníti
- Kitűnően tisztít, valamint vízkőoldó hatással is rendelkezik, így nincs szükség a fertőtlenítés előtt elő-tisztításra
- A felhasználókra és a felületekre nézve egyaránt biztonságos, a használatra kész oldat nem rendelkezik veszélyre utaló figyelmeztetéssel, nem tartalmaz a légzőszerveket irritáló összetevőket
- AHP tartalma kíméletes a felületekkel, így növelheti a berendezések élettartamát
- Az egészségügyben 'magas kockázatú besorolással rendelkező helyiségekben', vagy 'kiemelt gyógyászati egységekben' és felületeken, többek között intenzív osztályok, inkubátorok, betegszobák fertőtlenítésére is alkalmas

Összetevők

biocid hatóanyag: Hidrogén-peroxid (CAS:7722-84-1) 7,2%

Használati útmutató

Adagolás

A fertőtlenítő oldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni. Töröljük át a fertőtlenített felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az, előírt behatási ideig.

Kombinált (tisztító-, fertőtlenítő hatású) terméként tírten6 felhasználas:

baktericid: 2 % 30 mp


1,5% 5 perc

virucid: 2% 5 perc

yeasticid 4% 5 perc

Felhasználás előzetesen megtisztított felületen:

fungicid: 7% 30 perc/ 5% 60 perc

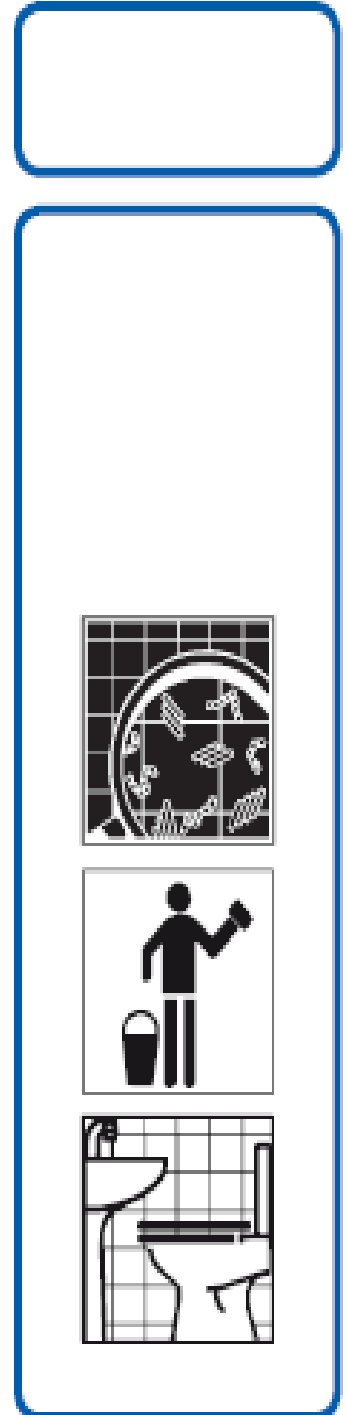

sporocid: 25% 30 perc/ 15% 60 perc

A kezelt felületet a teljes behatási idő alatt nedvesen kell tartani!

*: Záró-fertőtlenítőszerként alkalmazva, amennyiben a fertőtlenítés előtt a felületet már megtisztította.

A fertőtlenítő oldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni. Töröljük át a fertőtlenítendő felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig.

*: Záró-fertőtlenítőszerként alkalmazva, amennyiben a fertőtlenítés előtt a felületet már megtisztította.

A fertőtlenítő oldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni. Töröljük át a fertőtlenítendő felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd hagyjuk hatni az előírt behatási ideig.

Alkalmazás

Szórófejes tisztítás és fertőtlenítés:

1. Távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
2. Vigye fel az oldatot egy tiszta, száraz törölkendőre vagy közvetlenül a felületre egy szórófejes flakon segítségével.
3. A szükséges behatási idő** letelte után törölje a felületet szárazra, vagy hagyja megszáradni.

Vödörös tisztítás és fertőtlenítés:

1. Távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
2. Vigye fel az oldatot egy mop vagy törölkendő segítségével a felületre.
3. A szükséges behatási idő** letelte után törölje a felületet szárazra, vagy hagyja megszáradni.
4. Az oldatot legalább 24 óránként cserélje, vagy szükség szerint sűrűbben, ha az már szemmel láthatóan szennyezett.

Eldobható törölkendő rendszer:

1. Készítse elő az előírásoknak megfelelően az eldobható törölkendőket.
2. Távolítsa el a makacs szennyeződéseket.
3. Vegyen ki egy kendőt a dobozból, majd alaposan törölje át vele a felületet.
4. A szükséges behatási idő** letelte után törölje a felületet szárazra, vagy hagyja megszáradni.
5. A törölkendőket más felületre történő áttéréskor cserélje, vagy szükség szerint sűrűbben, ha az már szemmel láthatóan szennyezett.

Fontos: Az oldatot NE meleg vízzel készítse el! Ne keverje más tisztítószerrel! Ne használja víz- vagy sav-érzékeny felületeken!

** : A felületnek a behatási idő alatt végig nedvesnek kell maradnia.

Technikai adatok

Megjelenés:	Tiszta, színtelen folyadék
Relatív sűrűség [20° C]:	1,00 g/cm ³
pH (oldat):	1.9
pH (töményen):	0.55
Minőségmegőrzési idő:	2 év
Illat:	semleges

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. Oxidálható anyagokkal reagál.

Termékkompatibilitás: A termékismertetőben foglaltak betartása mellett a Oxivir Excel minden általánosan használt eszköz és felület fertőtlenítésére alkalmas.

Környezeti információ: A termékben található felületaktív összetevők a 648/2004. EK rendeletben foglaltaknak megfelelően biológiailag lebomlók.

Mikrobiológiai adatok: A termék mikrobiológiai hatékonyságát a következő mikrobiológiai tesztek igazolják: EN13727, EN13624, EN14476, EN13704.

Szennyezés-mentesítés: A folyadékot megkötő anyaggal itassuk fel.

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőző helyen, élelmiszerektől elkülönítve gyártástól számított 24 hónapig eltartható.

Terméktípus: PT2.

Gyártja: Multifill BV, Constructieweg 25a. Mijdrecht, P.O. Box 367, 3640 AJ

Forgalmazza: Diversey Kft. 2040 Budaörs, Puskás T u. 6.

OTH engedélyének száma: JKF/1025-4/2017.

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.